



diagnose 7

Manual de Instalação

LPT4 - Sistemas de Informação Ltda.

Diagnose Pró 7

O Diagnose Pró 7.0 é um software desenvolvido com a assessoria e aval de uma equipe médica especializada, para médicos e clínicas que buscam praticidade e agilidade no atendimento de pacientes.

Um computador com o programa Diagnose Pró e uma impressora conectados a um equipamento com saída de vídeo são suficientes para realizar exames com captura de imagem de grande qualidade.

O pedal de captura à distância permite ao médico trabalhar com as mãos livres, sem a necessidade de um computador próximo durante a realização do exame.

Isso torna o processo mais ágil, com qualidade superior e um custo muito baixo.

Requisitos Mínimos de Hardware

Para o Servidor:

- Windows*
- Processador Pentium IV ou AMD Atlon XP*
- 145 MB de espaço em Disco Rígido*
- 256 MB de memória RAM*
- Linux*
- Processador Pentium 100Mhz ou AMD K6-II 300Mhz*
- 145 MB de espaço em Disco Rígido*
- 256 MB de memória RAM*

Para o Cliente

- Processador Pentium 233 ou AMD K6-II*
- 22 MB de espaço em Disco Rígido*
- 128 MB de Memória RAM*

CONTRATO DE LICENÇA DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Produto para usuário individual - Este instrumento é um contrato entre V. As., o usuário final, LPT4 Sistemas de Informação Ltda, empresa constituída sob as leis do Estado do Paraná, República Federativa do Brasil. A TRAVÉS DO SIMPLES INSTALAÇÃO DESTE SISTEMA V. As. ESTÁ CONCORDANDO EM ACEITAR TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE CONTRATO.

CONCESSÃO DA LICENÇA - A LPT4 concede o direito de uso de uma cópia do incluso programa de computador (doravante denominado "SOFTWARE") em um único computador. O SOFTWARE está em "uso" em um computador quando estiver carregado na memória temporária (isto é, na RAM) ou instalado na memória permanente (por exemplo, um disco rígido, CD ROM, ou outro dispositivo de armazenamento) do computador. A instalação, entretanto, em um servidor da rede com um único propósito de distribuição para um ou mais computadores não se constitui em "uso", para o qual uma licença adicional é requerida.

DIREITOS AUTORAIS - O SOFTWARE (incluindo quaisquer imagens, fotografia, animação, vídeos, áudios, músicas e textos incorporados ao SOFTWARE) pertence à LPT4, e é protegido pela legislação de direitos autorais da República Federativa do Brasil, tratados internacionais e outras leis nacionais aplicáveis. Assim, deve tratar o SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelo direito autoral (por exemplo, um livro ou gravação musical), exceto que, quando o mesmo não estiver protegido contra cópia. É vedado a reprodução da documentação que acompanham o SOFTWARE.

SOFTWARE APRESENTADO EM DOIS MEIOS FÍSICOS - É vedado o uso dos demais discos em outro computador, bem como, emprestar, alugar, arrendar ou transferir os mesmos a um outro usuário, salvo como parte de uma transferência ou uso expressamente previsto neste Contrato de Licença.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (DANOS INDIRETOS) - EM NENHUMA HIPÓTESE A LPT4 OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER OUTROS DANOS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADOS, A LUCROS CESSANTES, INTERRUPTÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES E OUTROS PREJUÍZOS PECUNIÁRIOS) DECORRENTES DO USO, OU DA IMPOSSIBILIDADE DESTES DANOS. EM QUALQUER CASO, A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA LPT4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOB ESTE CONTRATO LIMITAR-SE-Á AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO SOFTWARE.

Este Contrato é regido pelas leis da República do Brasil.

Caso tenha qualquer dúvida em relação a este Contrato, ou caso deseje contatar a LPT4 por qualquer motivo, favor escrever para:


LPT4 Sistemas de Informação Ltda
Rua Desembargador Manoel de Lacerda Pinto, 395
Bacacheri
82600-490 - Curitiba - PR

e-Mail: suporte@lpt4.com.br
Homepage: <http://www.lpt4.com.br/sup.php>
Telefone: (41) 3356-3315


1 Instalação

1.1 Introdução


Caso você esteja efetuando a instalação num computador com Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 ou Windows XP e não estiver logado com Administrador ou Power User, será apresentada a tela abaixo:

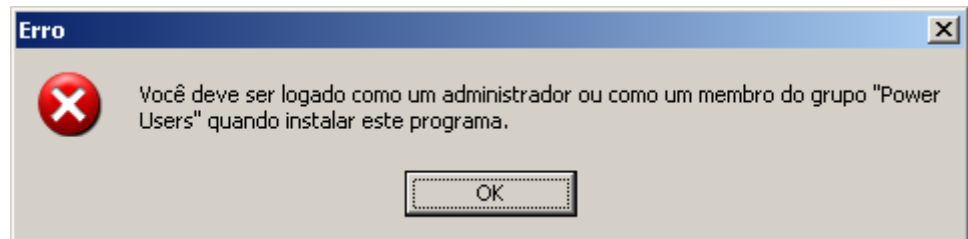


Caso isso ocorra, efetue Logoff ou Troca de Usuário para poder realizar a instalação.

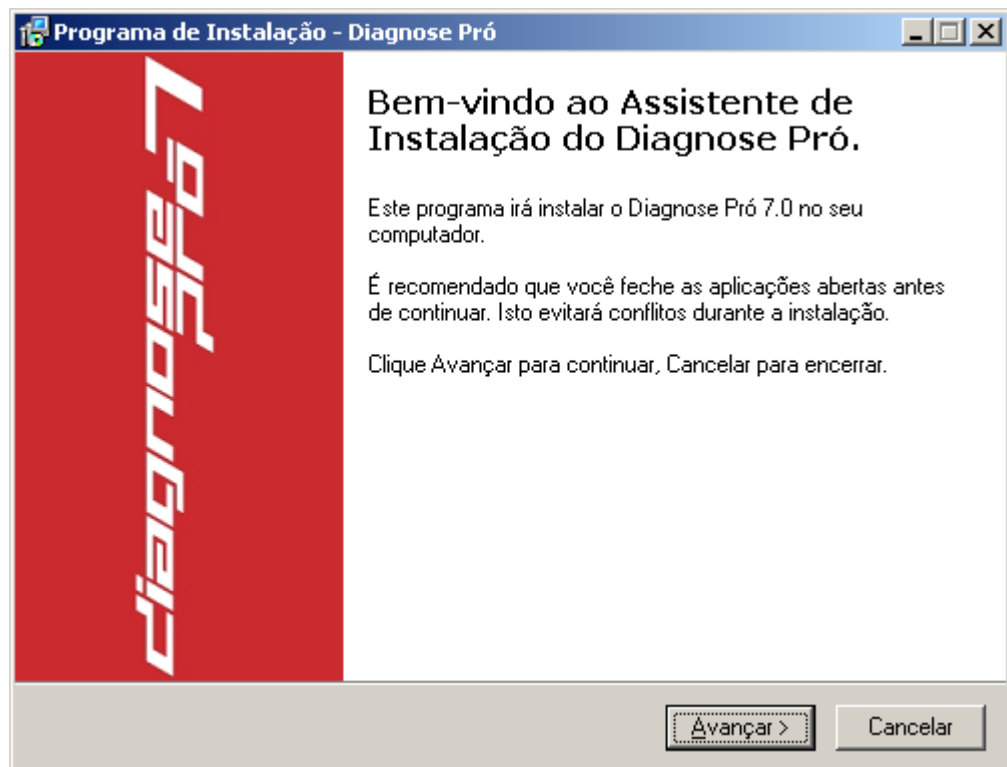


1.2 Licença

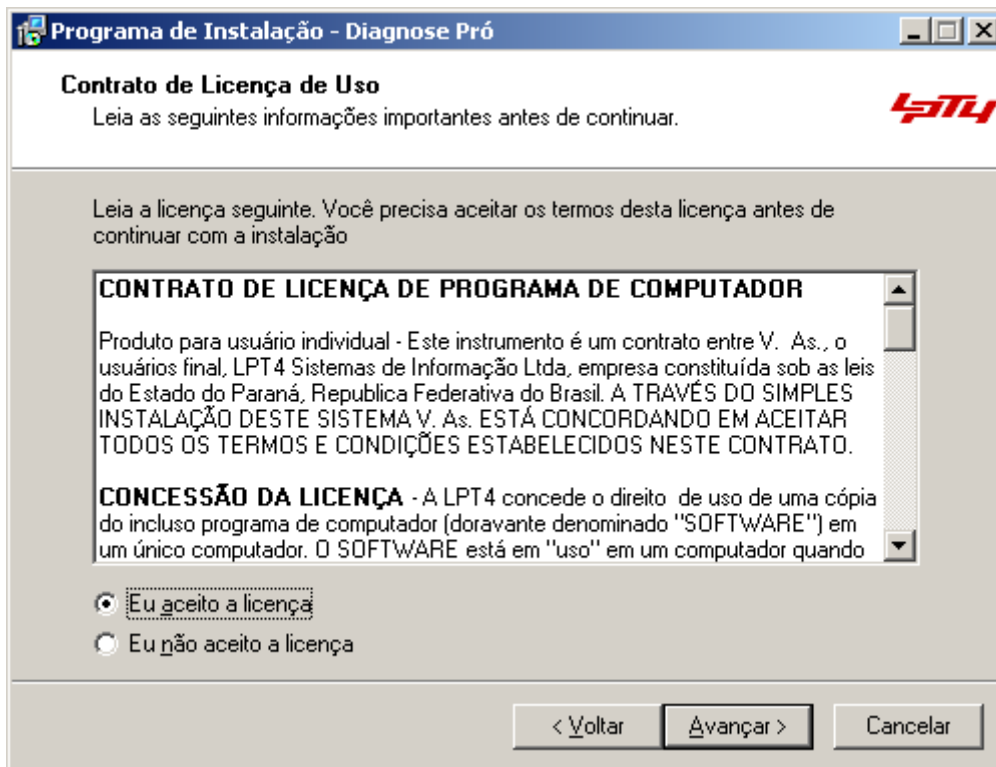

1.3 Pasta de Destino

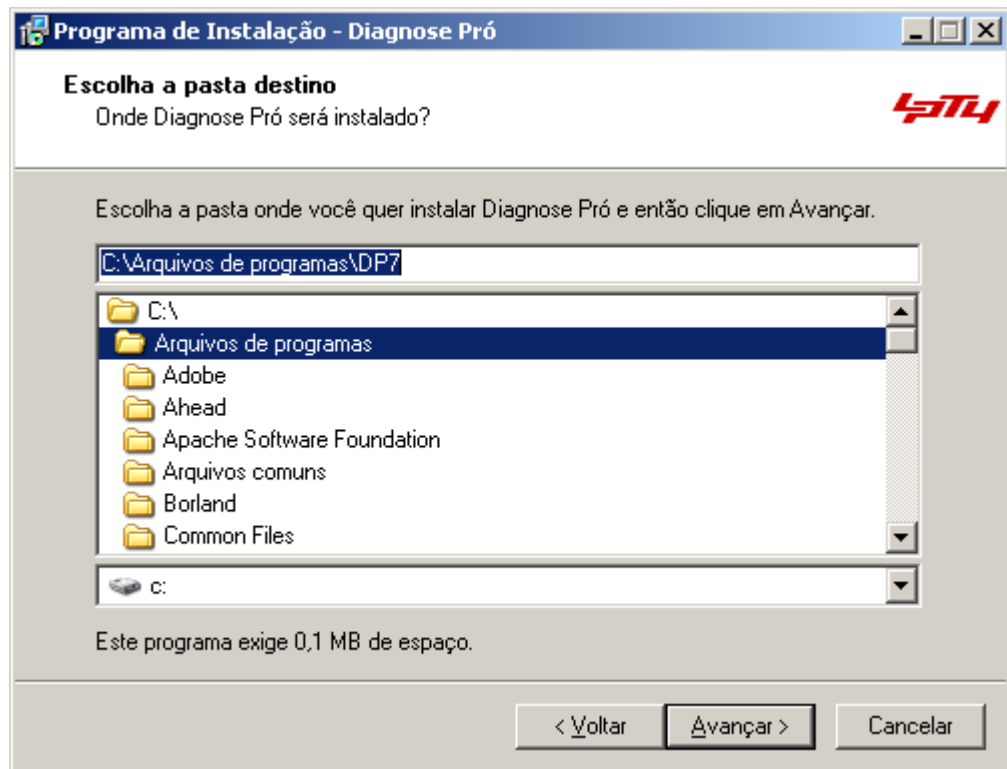


Caso a pasta de destino selecionada não exista, será apresentada a tela a seguir:

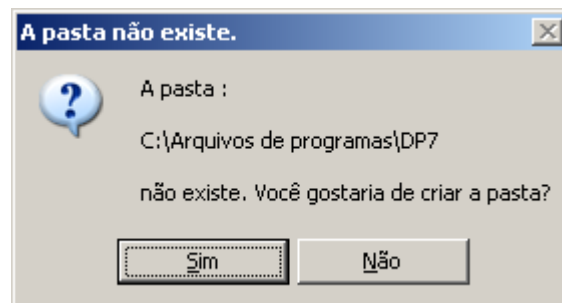

Clique em Sim para que o assistente crie a pasta de destino ou em Não para selecionar uma pasta diferente.

Caso a pasta de destino selecionada já exista, será apresentada a tela a seguir:

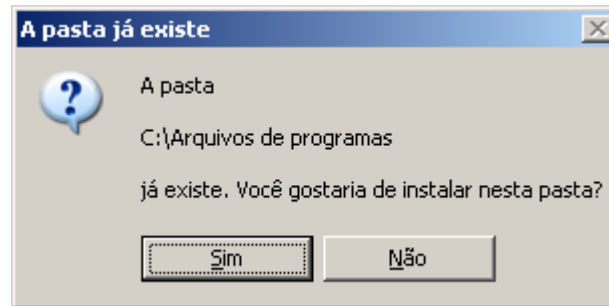


Clique em Sim para que o assistente instale nessa pasta ou em Não para selecionar uma pasta diferente.

1.4 Tipo de Instalação

O Diagnose Pró 7.0 possui os seguintes componentes para instalação:


- Diagnose Pró 7.0
 - Instala o aplicativo e bibliotecas necessárias para o funcionamento do Diagnose Pró 7.0.
- Banco de Dados DP7
 - Instala um arquivo de dados inicial para o funcionamento do Diagnose Pró 7.0.
- Banco de Dados CEP
 - Instala um arquivo de dados com CEP do Brasil, utilizado para facilitar o cadastro de Médicos e Pacientes
- Documentação
 - Instala os manuais do Diagnose Pró 7.0
- Servidor Firebird
 - Instala o Servidor de Banco de Dados do Diagnose Pró 7.0
- Cliente Firebird
 - Instala o Cliente de Banco de Dados do Diagnose Pró 7.0

O Diagnose Pró 7.0 possui três instalações pré-definidas, além da personalizada:

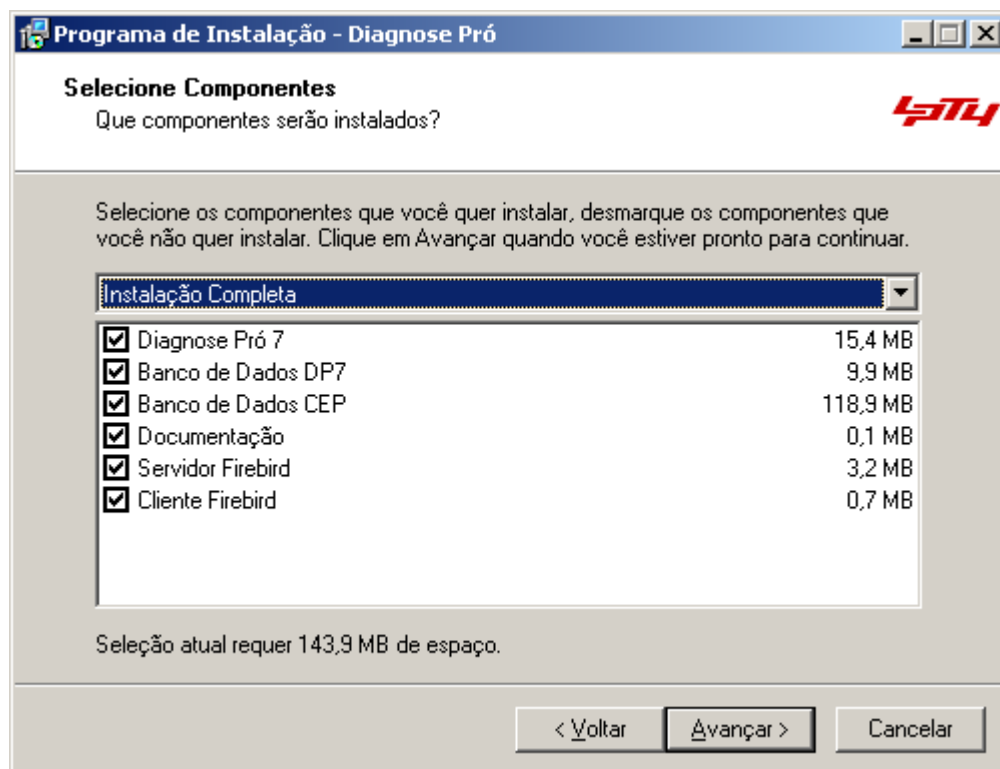


Instalação Completa

Essa opção irá instalar todos os componentes do Diagnose Pró no seu disco rígido. Ela é recomendada para casos de utilização em um único computador ou quando o servidor é também uma estação de trabalho.

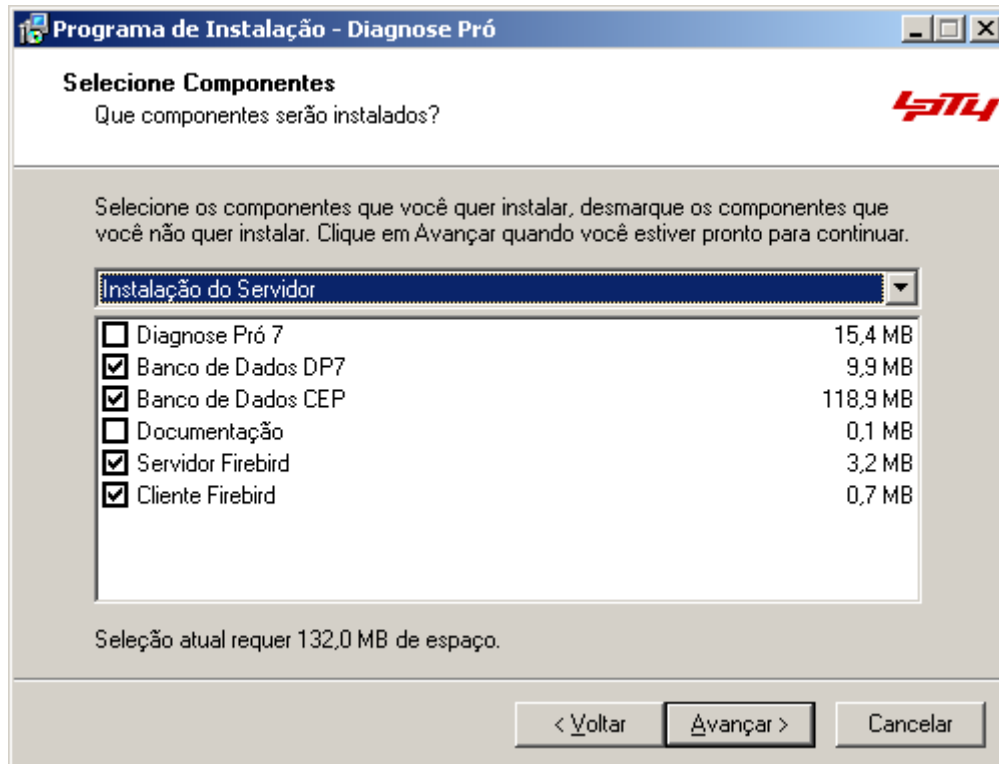


Instalação do Servidor

Essa opção irá instalar os componentes necessários para o funcionamento do Servidor do Diagnose Pró 7.0. Ela é recomendada para casos de utilização do Sistema em Rede em que existe um Servidor dedicado e o qual não é também uma estação de trabalho.

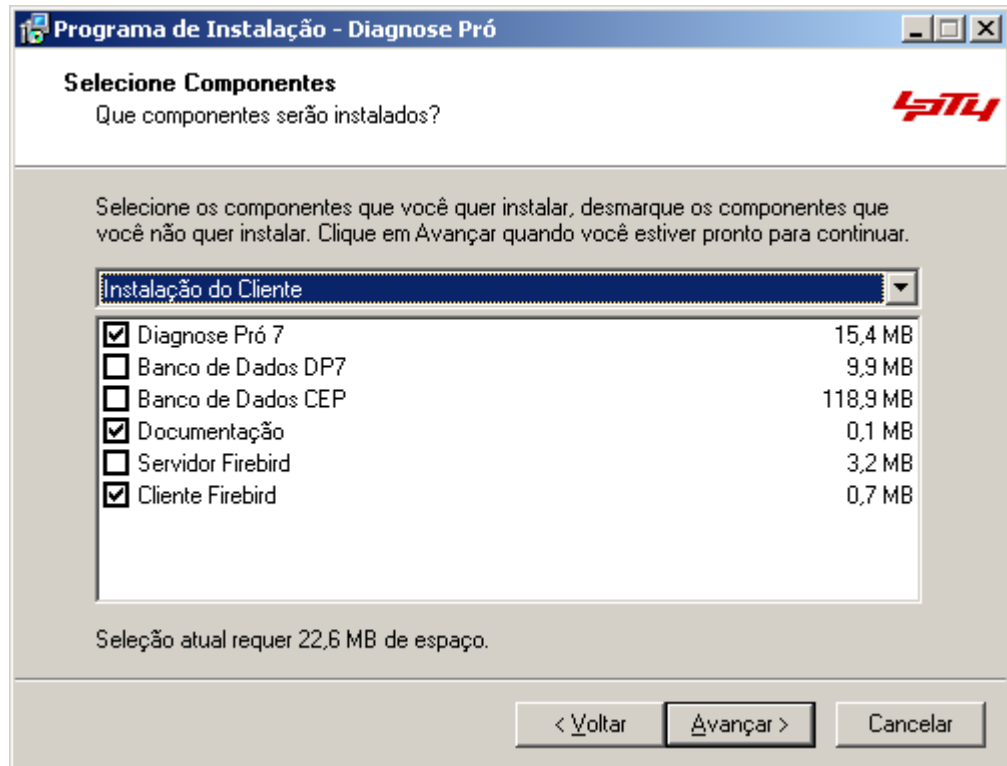

Instalação do Cliente


Essa opção irá instalar os componentes necessários para o funcionamento do Cliente do Diagnose Pró 7.0. Ela é recomendada para casos de utilização do Sistema em Rede em que existe um Servidor dedicado.

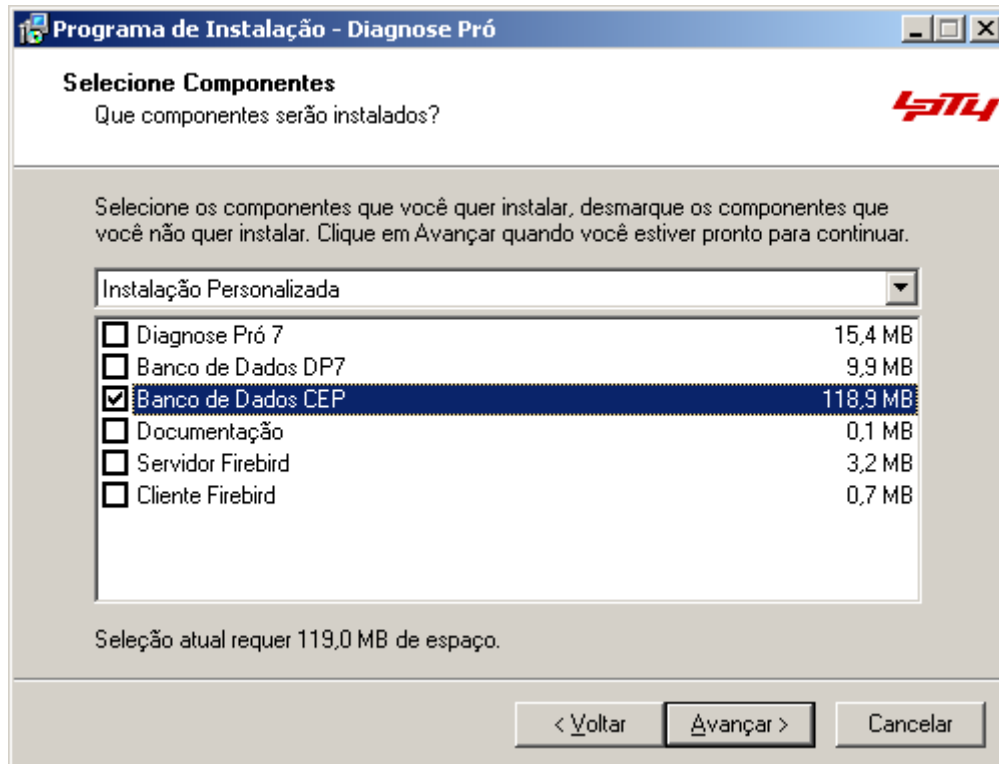


Instalação Personalizada

Essa opção permite ao usuário selecionar quais componentes do Diagnose Pró 7.0 serão instalados. Ela é recomendada para casos de reinstalação do Diagnose Pró 7.0.


1.5 Grupo de Programas

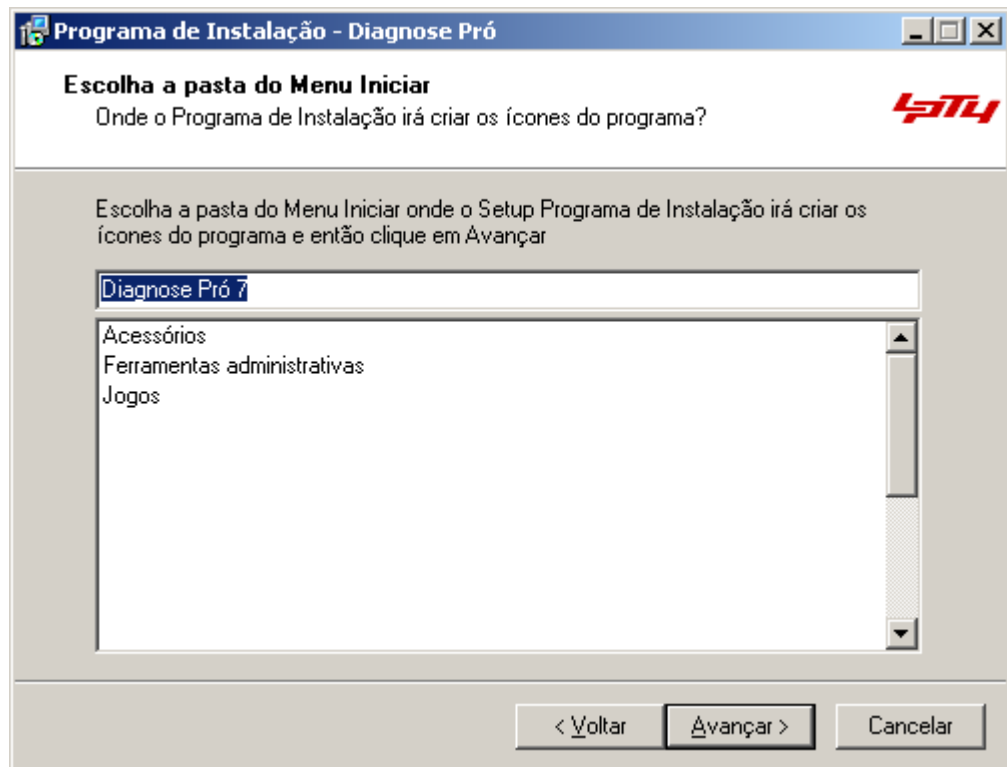


1.6 Ícones de Atalho

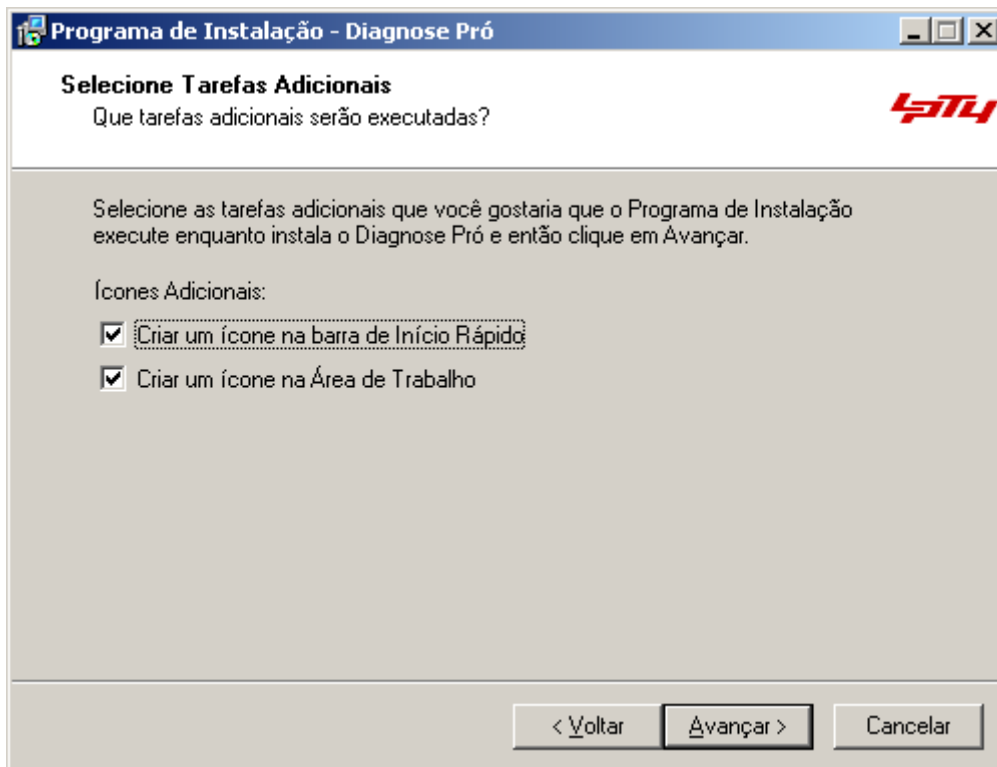


1.7 Resumo da Instalação

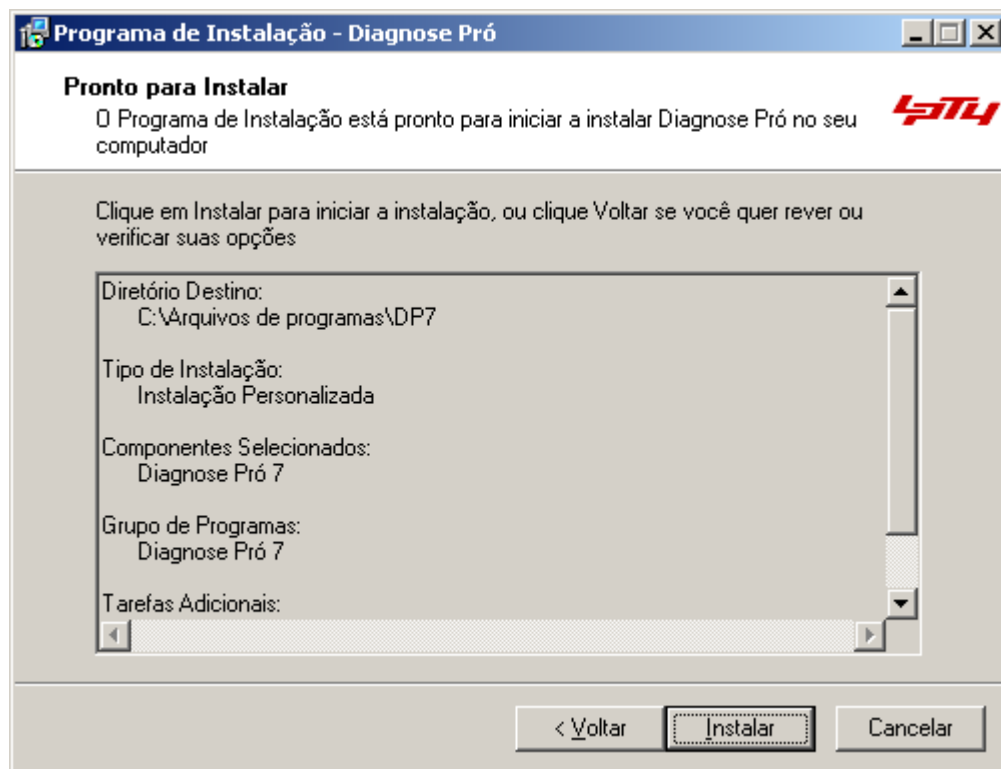

1.8 Instalando

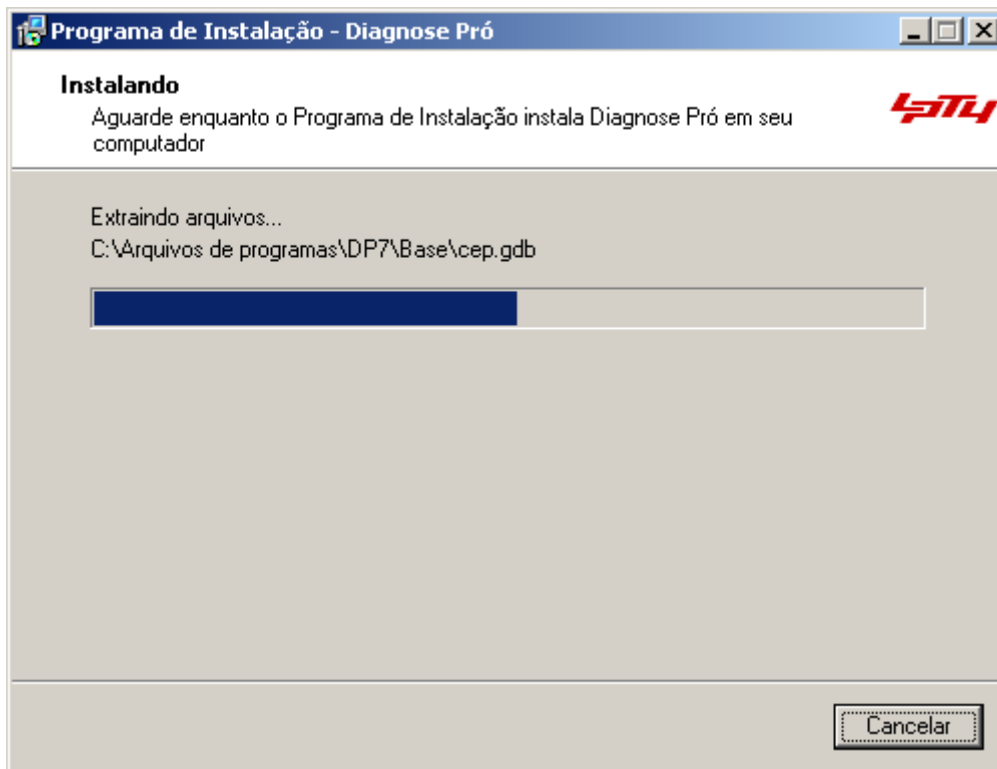

1.9 Conclusão

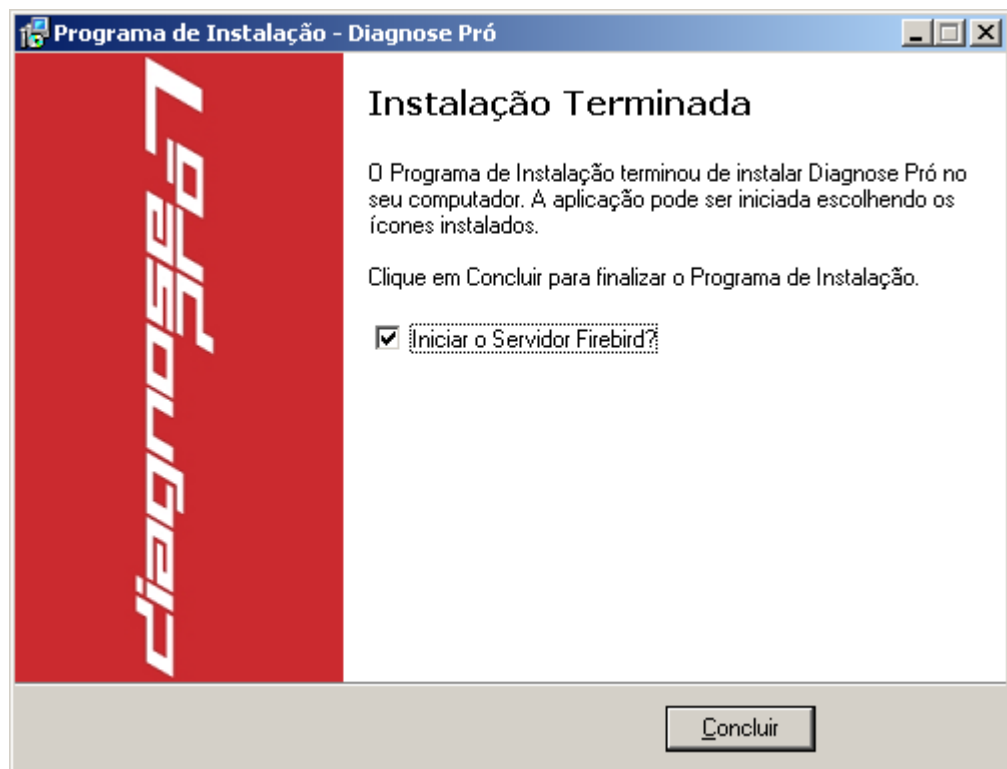

Após a instalação, execute o Diagnose Pró 7.0 através do atalho do Desktop ou do Menu Iniciar e configure as informações de acesso do aplicativo.

Login	Senha	
<input type="text" value="super"/>	<input type="password" value="xxxxx"/>	
OK	Cancelar	Mais >>

Na tela acima, clique em Mais.

The image shows a dialog box for database connection. At the top, there are two input fields: 'Login' containing 'super' and 'Senha' containing '*****'. Below these are three buttons: 'OK', 'Cancelar', and '<< Menos'. The main area is titled 'Conexão com o Banco de Dados' and contains three fields: 'Tipo' with radio buttons for 'Local' and 'Remota' (selected), 'Servidor' containing 'GDBServer', and 'Caminho' containing '/home/interbase/d7base.gdb'.

Na tela acima, informe se a conexão é Local ou Remota, ou seja, se o arquivo de dados (d7base.gdb) está neste computador ou outro da rede.

Caso esteja na rede, informe o Nome ou o IP do Servidor.

No caminho, digite a localização do arquivo d7base.gdb.

Essa informação é sempre o caminho absoluto do arquivo d7base no computador onde ele se encontra.

Por exemplo:

- C:\Dados\d7base.gdb num computador Windows
- /home/dados/d7base.gdb num computador Linux

Não use caminho relativos de rede, por exemplo, \\servidor\dados\d7base.gdb.